

تاریخ: ۹۳/۷/۲۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان بیمارستان ایثار ایجرود	
بخش: اتاق عمل	دستورالعمل استفاده از دستگاه بیهوشی	

شماره شناسایی: ۹۱۰۱۵۱

مدل دستگاه: AV800E

مارک دستگاه: DATEC

شرکت فروشنده: سرآمد طب پارچه

شماره سریال: DA.RB.911103

نحوه نگه داری: قطعات فولاد ضد زنگ، سطوح رنگ شده و قطعات و سطح آلومینیومی باید با پارچه نمدار و آب و صابون دار تمیز شوند.

از تمیز کننده های دارای محلول آمونیاک، اسید فنیک، کلر یا استون استفاده نکنید.
دستگاه هرگز نباید با تمیز کننده های سمیاده ای تمیز شود. سطوح پلاستیکی باید با پارچه نرم نمدار تمیز شده و با پارچه خشک، خشک شوند.

عوامل بیهوشی خاص ممکن است تاثیر ساینده بر سطوح رنگ شده داشته باشند. در صورت ریختن باید سریعاً تمیز شوند. قطعات استیکی و پلاستیکی باید با پارچه نرم و شوینده های نرم تمیز شوند.
تمام قسمتهای لاستیکی و پلاستیکی را در ماده گند زدا مناسب خیس کنید. کانال بشوید ابکشی و اتوکلاو کنید.

اکثر اجزای لاستیکی را می توان در ماشین شسته و برای مدت ۲۰ دقیقه با درجه حرارت ۱۲۱ درجه سانتی گراد (۲۵۰ درجه فارنهایت) در اتوکلاو گذاشت.