

تاریخ: ۹۳/۷/۲۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان بیمارستان ایثار ایجرود	
بخش: آزمایشگاه	دستورالعمل نحوه استفاده از دستگاه سل کانترسیسمکس	
مارک دستگاه: sysmex مدل دستگاه: KX-21N شماره شناسایی: ۹۱۰۲۰۶ شرکت فروشنده: الکترونیک پیشرفته		
بررسی اولیه: شامل اطمینان از موجود بودن محلولهای مصرفی وصل به دستگاه (حتما قبل از روشن کردن دستگاه سطح لایز وایزوتون ارزیابی شود). وجود کاغذ در پرینت و اتصال لوله Waste به ظرف فاضلاب بوده دستگاه توسط کلید کناری روشن میکنیم. الف-انجام شدن Shut down, آخرین بار قبل از خاموشی: چنانچه اقدام فوق به هر علتی انجام نشده باشد به صورت پیغام روی صفحه ظاهر میشود. این اعلام با زدن دکمه ۱ از صفحه نمایش دستگاه پاک میگردد. ب-شستشوی اتوماتیک (Auto Rinse) بک گراند (Back ground) حالت آماده (Ready): دستگاه پس از سه مرتبه شستشوی اولیه در صورت مطلوب بودن نتایج به حالت (Ready) در می آید در غیر این صورت پیغام Back ground error میدهد. ج-نمونه دهی: فقط در حالت Ready مسیر میسر است در این حالت با فشردن دکمه Sample No شماره نمونه وارد میشود با دکمه Enter آن تایید میشود (حتما شماره بیمار وارد شود تا در آرشیو بیماران قرار گیرد) توجه نکته مهم: نمونه CBC را که حتما پیش از آزمایش روی میکسر قرار داده شده آزمایش می شود نمونه را پس از برداشتن از میکسر چند بار آهسته تکان داده و سپس با سوابهای چوبی شکسته شده از نظر داشتن لخته بررسی نمایید بعد به دستگاه برای خوانش داده شود وجود لخته باعث آسیب به SRV دستگاه میشود.		

پنجاب
پنجاب
پنجاب