

تاریخ: ۹۳/۷/۲۶		دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان بیمارستان ایثار ایجرود			
بخش: آزمایشگاه		دستورالعمل نحوه استفاده از دستگاه سانتریفیوژ			
نحوه نگه داری: لطفاً دستگاه در مجاور وسایل حرارتی یا تبخیر از قبیل بن ماری جوش، کوره و... قرار نگیرد. برای تمیز کردن آن از یک پارچه نیمه مرطوب استفاده شود. به تناوب از دستگاه استفاده شود نه به طور پیوسته. درب دستگاه به آرامی باز و بسته شود.			مارک دستگاه: پارس آزما مدل دستگاه: DGT24 شماره شناسایی: ۹۱۰۲۰۳-۹۱۰۲۰۴ شرکت فروشنده: پارس آزما		
ابتدا کابل را به پریز ارتدار بزنید. سپس توسط کلید پشت دستگاه، دستگاه را روشن نمایید پس از روشن کردن دستگاه و دادن پیغام شروع به کار نمایید. منوهای اصلی شامل ۶ منو است با استفاده از کلیدهای UP-Down میتوانید بین این ۶ منو حرکت نمایید. اجرای سریع حافظه ۱: در این منو حافظه شماره ۱ برای کاربری روزانه تنظیم شده است. برای اجرای سریع آن کافیست نشانگر فلش را روی منوی شماره ۱ قرار داده و با فشردن کلید Enter بر روی منوی ۱ دستگاه شروع به کار مینماید. (این منو روزانه مورد استفاده قرار میگیرد. دور ۳۰۰۰ و به مدت ۵ دقیقه میباشد پس دقت نمایید فلش روی منوی ۱ باشد). تذکر: تایمر پس از اینکه دور دستگاه به دور تنظیمی رسید به صورت معکوس شروع به کار خواهد کرد. اجرای حافظه ها: این منو ۸ حافظه دارد برای تنظیم دور و زمان جدید برای بعضی آزمایشات نیاز است برای انجام آن روی منو ۲ باید بروید برای تنظیم آن به دفترچه راهنما مراجعه نمایید البته در حال حاضر بعضی دورها سرعت مشخص بر روی منوی ۲ تعریف شده در صورت نیاز به حافظه جدید به دفترچه مراجعه نمایید. توقف اضطراری: در صورت نیاز با فشردن کلید BRAKE انجام میشود (توجه فقط در موارد ضروری استفاده شود). نکات: ۱- در صورت روشن نشدن دستگاه فقط فیوز امتحان شود در غیر این صورت با واحد خدمات شرکت تماس حاصل نمایید. ۲- در صورتی که از دستگاه استفاده نمیکنید کلید پاور پشت دستگاه را خاموش کنید. ۳- از آجایی که این سیستم نسبت به پارازیت حساس است در صورت اختلال در سیستم ابتدا دستگاه را خاموش کرده بعد چند دقیقه روشن نمایید.					