

تاریخ: ۹۳/۷/۲۶ بخش: آزمایشگاه	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان بیمارستان ایثار ایجرود دستورالعمل استفاده از دستگاه الایزا ریدر	
شرایط نگه داری: دستگاه را در محیطی به دور از آفتاب و گردوغبار قرار دهید-شرایط مناسب دما و رطوبت برای دستگاه فراهم آورید-از شستن آن باتینروالکل خودداری فرمایید-از برق شهر بدون نوسان استفاده کنید.	مارک دستگاه: گارنی G مدل دستگاه: DA-3200 شماره سریال: ۱۶۹۷۹ شماره شناسایی: ۹۱۰۲۲۵ شرکت فروشنده: گارنی ریز پرداز	
در هنگام استفاده از دستگاه ابتدا با استفاده از کلید ON/OFF از پشت دستگاه آن را روشن نموده و پس از ۵ ثانیه پرینتر را روشن نمایید. Cut off control test Y/N: با توجه به بروشور کیت در صورت محاسبه No، Cut off را انتخاب میکنیم و در صورتیکه ویال Cut off داشته باشیم yes را انتخاب خواهیم کرد. پس از انتخاب فیلتر اصلی و فیلتر رفرانس در فرمول ظاهر شده: $Cut\ off = x * mNc + y * mPc + fac$ ضرایب X، Y و fac را بر طبق بروشور کیت وارد نمایید. #Of Neg controls=? تعداد کنترل های منفی را وارد نمایید (میانگین آنها برای محاسبه Cut off) استفاده خواهد شد. Neg co. must be در صورتیکه در بروشور کیت محدوده خوانش کنترل منفی قید شده باشد مقدار آنرا وارد کنید در غیر این صورت با Enter به مرحله بعد بروید. #Off pos controls=? تعداد کنترل های مثبت را وارد نمایید. Pos Co. must be در صورتیکه در بروشور کیت محدوده خوانش کنترل مثبت قید شده باشد محدوده آنرا وارد نمایید در غیر این صورت با ENTER به مرحله بعد بروید. Mp/mN must be در صورتیکه در بروشور کیت نسبت خوانش کنترل مثبت به کنترل منفی قید شده باشد مقدار آنرا وارد کنید و در غیر این صورت با ENTER به مرحله بعد بروید. Load next plate: تست آماده خوانش است plate را در محل خود قرار داده و با استفاده از دکمه Read شروع به خوانش کنید.		