

تاریخ: ۹۳/۷/۲۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان بیمارستان ایثار ایجرود		
بخش: آزمایشگاه	دستورالعمل نحوه استفاده از دستگاه الایزا و اشرف		
مارک دستگاه: گارنی G مدل دستگاه: DA-2600 شماره سریال: ۱۷۴۸۹ شماره شناسایی: ۹۱۰۲۲۴ شرکت فروشنده: گارنی ریز پرداز			
درون بطری wash, محلول شستشو تست مورد نظر و در بطری Rinse, مقداری آب مقطر بریزید و سپس درب بطری ها را کاملاً محکم ببندید. کابل برق دستگاه را به پریز برق متصل نموده و دستگاه را روشن نمایید. توجه: برای شستشوی داخلی دستگاه از آب مقطر یا محلول Rinse استفاده کنید. در ابتدا کمپرسور شروع به کار می نماید تا خلأ و فشار سیستم را به میزان معینی برساند. در این هنگام افزایش سطح فشار درون بطری ها را میتوان بر روی صفحه نمایش مشاهده نمود. همزمان با تامین فشار بطری ها صفحه نمایش را بصورت زیر میتوان مشاهده نمود.			
pr.2.0		Vac:off	
Wash bottle Rinse (Quit) (Down) (UP) (ok)			

مهر و امضای واحد تجهیزات پزشکی