

تاریخ: ۹۳/۷/۲۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان بیمارستان ایثار ایجرود	
بخش: آزمایشگاه	دستورالعمل نحوه استفاده از دستگاه الیزا و اشرف	

در این حالت هر کدام از مسیرهای شستشو که مدنظر باشد بایستی توسط اپراتور انتخاب و اصطلاحاً هواگیری شود.

در دستگاه ۲۶۰۰ Plus پیش فرض بر روی Wash Bottle میباشد. در این حالت میتوان با استفاده از کلیدهای → و ← یا ok گزینه مورد نظر را انتخاب نموده و کلید ok صفحه کلید را بفشارید. در صورتی که از Rinse استفاده میکنید، ابتدا با کلیدهای پیکان جهت دار به سمت بالا یا پایین مسیر شستشوی مورد نظر را انتخاب نموده و کلید ok | بفشارید. در این هنگام دستگاه عمل هواگیری یا به اصطلاح Prime را در داخل حوضچه انجام می دهد. در صورتی که با یک بار عمل Prime محلول شستشو به هد شستشو نرسد، مجدداً این عمل تکرار میشود. پس از این که از هواگیری میر شستشو اطمینان حاصل گردید، دستگاه و اشرف آماده به کار میباشد.

خاموش کردن دستگاه :

قبل از خاموش کردن دستگاه باید با محلول Rinse دستگاه را شستشو داد سپس دستگاه را خاموش کرد. برای این منظور کلید Power را فشرده و پس از تایید، دستگاه به طور اتوماتیک عمل Rinse و تخلیه فشار درون بطری ها را انجام میدهد. پس از آنکه صفحه نمایش به حالت Stand by در آمد (هیچ نوشته ای بر روی صفحه نمایش وجود ندارد) با استفاده از کلید پشت دستگاه را خاموش کنید.