

تاریخ: ۹۳/۷/۲۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان بیمارستان ایثار ایجرود	
بخش: آزمایشگاه	دستورالعمل نحوه استفاده از دستگاه سدیمان آنالایزر	
نحوه نگه داری: دستگاه را از تابش مستقیم نور خورشید جلوگیری کنید- آنرا در کنار تجهیزات مثل یخچال یا سانتریفیوژ قرار ندهید- دقت شود در هنگام گذاشتن لوله داخل دستگاه، خون داخل دستگاه نریزد و اگر روی دستگاه ریخته شد می توانید با پارچه ای نرم و مرطوب آن را پاک کنید.		مارک دستگاه: پارسیان طب مدل دستگاه: Sedimex شماره سریال: ۱۵۱۷۷ شماره شناسایی: ۹۱۰۲۰۵ شرکت فروشنده: پارسیان طب زمان
لوله هارا که از نمونه خون پر کرده اید میبایست حداقل ۵ دقیقه مخلوط شوند، پس از آن بدون زدن هیچ دکمه ای، آن لوله را داخل یکی از سوراخهای تعبیه شده کنید. پس از آن دستگاه به مدت ۳ دقیقه صبر میکند تا خونی که در اثر مخلوط کردن روی جداره لوله ها است به طور کامل پایین آید تا دستگاه بتواند سطح واقعی خون را شناسایی کند. پس از گذشت ۳ دقیقه اگر حجم خون در اندازه ای که در قسمت اول اشاره شد، ریخته شده باشد، دستگاه شروع به آنالیز کرده و سپس حرف A را داخل آن چهار خانه مخصوص خود مینویسد و پس از گذشت ۳۰ دقیقه یا ۶۰ دقیقه (بنا بر مد 1 HR یا 2 HR) جواب سدیمان را در همان چهار خانه می نویسد. حال اگر اشتباهی در ریزش حجم خون شده باشد خطاری با حرف L نوشته میشود و در این صورت دیگر آن لوله خوانش نخواهد شد. در نتیجه لطفا دقت شود که حجم خون ریخته شده حداکثر تا آن خط روی لوله ریخته شود. این حساسیت به این دلیل است که اگر نسبت خون سیترات سدیم تغییر کند تاثیر زیادی در جواب نهایی سدیمان خواهد کرد.		