



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان
بیمارستان ایثار ایجروود

تاریخ: ۹۳/۷/۲۶

بخش:

بلوک زایمان

دستورالعمل استفاده از دستگاه تخت احیاء نوزاد


مارک دستگاه: TOSAN

مدل دستگاه: ۰۸۳

شماره شناسایی: ۹۱۰۰۴۴ شرکت فروشنده: توسان

نحوه نگه داری: برای نظافت از یکپارچه آغشته به مواد ضد عفونی استفاده نمایید. لطفاً برای نظافت دیوارهای شفاف تخت از الکل استفاده نکنید. به دلیل وجود الکترو موتور و مدارهای برقی در قسمتهای مختلف دستگاه از پاشیدن آب به قسمت های مختلف جدا خودداری کنید.

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| ۱ - زمان سنج | ۹ - نمایشگر تنظیم دما |
| ۲ - کلید روشن و خاموش زمان سنج | ۱۰ - دکمه های تنظیم دما |
| ۳ - کلید فعال کننده زمان سنج | ۱۱ - هشدار حرارت بیش از حد |
| ۴ - کلید روشن و خاموش لامپ هالوژن | ۱۲ - هشدار قطع حسگر دما |
| ۵ - کلید روشن و خاموش ساکشن | ۱۳ - هشدار خاموش بودن سیستم گرم کننده |
| ۶ - کلید روشن و خاموش دستگاه | ۱۴ - هشدار خالی بودن باتری |
| ۷ - محل نصب حسگر دما | ۱۵ - هشدار انحراف دما |
| ۸ - نمایشگر حسگر | ۱۶ - دکمه کنترل دستی و خودکار |

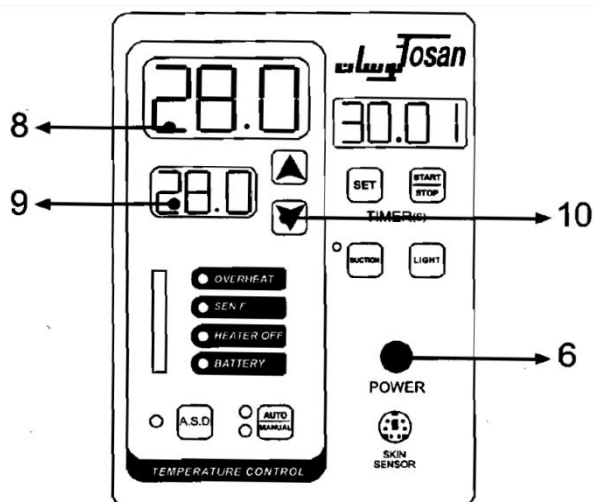

طریقه کار با صفحه کلید

نصب و راه اندازی

- ۱ - کلید on/off (۶) روی صفحه کلید را فشار دهید.
- ۲ - نمایشگر (۸) دمای خوانده شده توسط حسگر را نشان می دهد.
- ۳ - نمایشگر (۹) حرارت تنظیم شده توسط کاربر می باشد.
- ۴ - بادکمه دمای (۱۰) می تواند حرارت مورد نظر را تنظیم نماید.

