

تاریخ: ۹۳/۷/۲۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان بیمارستان ایثار ایجرود	
بخش: بلوک زایمان		

دستورالعمل استفاده از دستگاه احیاءنوزاد

نصب و راه اندازی

طریقه کار با صفحه کلید

به دو صورت می توانید از این دستگاه استفاده کنید:

- حالت Automatic (خود کار)
- حالت Manual (دستی)

حالت خودکار:

اگر دکمه Auto / Automatic را فشار دهید بصورتیکه نشانگر Auto روشن شود، دستگاه بصورت خودکار عمل کرده و نمایشگر سبز رنگ دمای حس شده توسط حسگر را نشان می دهد. این در صورتی است که حسگر دما سالم و در جای خود قرار گرفته باشد.



اگر به دلایلی حسگر دما قطع شده باشد و در جای خود نصب نشده باشد دستگاه شروع به هشدار نوری و صوتی میکند اگر در این حالت دکمه $\frac{Auto}{Automatic}$ را فشار دهیم. دستگاه بصورت دستی شروع به کار میکند و هشدار صوتی قطع میگردد. هشدار نوری همچنان چشمک زن باقی مانده و چراغ Manual نیز شروع به چشمک زدن میکند. اگر حسگر پوستی در جای خود قرار بگیرد هشدار نوری قطع شده و با فشار دادن مجدد کلید $\frac{Auto}{Automatic}$ میتوان دستگاه را روی حالت خودکار قرار داد.



حالت Manual (دستی)

دکمه Auto / Manual را فشار دهید بطوریکه نشانگر Manual شروع به چشمک زدن کند. در این صورت نشانگر سبز رنگ در صورت وجود داشتن حسگر فقط دمای حس شده را نشان می دهد. و دستگاه حرارت را متناسب با عدد تنظیم شده تنظیم میکند.

