

تاریخ: 93/7/26	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان بیمارستان ایثار ایجرود	
بخش: اتاق عمل		
دستورالعمل نحوه استفاده از تخت جراحی		
PM دستگاه: کلیه سطوح تخت را توسط پارچه آغشته به مایع ضد عفونی کننده استریل نمایید. از ریختن مایعات ضد عفونی کننده یا مایعات دیگر روی پنل کنترل و سوکت اتصال آن جداً پرهیز نمایید. و در صورتی که در نظر است پانل کنترل ضد عفونی شود آن را با پارچه نمدار با مایع ضد عفونی استریل فرمایید.	مارک دستگاه: FARAFAN مدل دستگاه: OT-931E شماره سریال: 016/1831 شماره شناسایی: 910152 شرکت فروشنده: مهندسی فرافن	
تنظیم ارتفاع - بالا: با فشردن همزمان کلیدهای 8 و 9 پانل کنترل ،خت به طرف بالا حرکت میکند.		
تنظیم ارتفاع -پایین: با فشردن همزمان کلیدهای 7 و 9 پانل کنترل تخت به طرف پایین حرکت میکند.		
چرخش عرضی (TILT) راست: با فشردن همزمان کلیدهای 5 و 9 پانل کنترل تخت به طرف راست حرکت می نماید.		
چرخش عرضی (TILT) چپ: با فشردن همزمان کلیدهای 6 و 9 پانل کنترل تخت به طرف چپ حرکت می نماید.		
تنظیم پشت -پایین: با فشردن همزمان کلیدهای 3 و 9 پانل کنترل قسمت پشت تخت به سمت پایین حرکت می نماید.		
تنظیم پشت - بالا: با فشردن همزمان کلیدهای 4 و 9 پانل کنترل قسمت پشت تخت به سمت بالا حرکت می نماید.		
دوران طولی Trend به سمت پا: با فشردن همزمان کلیدهای 1 و 9 پانل کنترل تخت در طول چرخش می نماید.		
دوران طولی Trend به سمت سر: با فشردن همزمان کلیدهای 2 و 9 پانل کنترل تخت در طول چرخش می نماید. (سر پایین)		