

تاریخ: 93/7/26 بخش: آزمایشگاه	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان بیمارستان ایثار ایجرود	
	دستورالعمل استفاده از دستگاه BT 1500	
مارک دستگاه: BT1500 شماره شناسایی: 910213 مدل دستگاه: BT1500 شرکت فروشنده: فراسامد شماره سریال: 47131672		
-چک کردن سطح محلولها (حداقل به اندازه مصرف روزانه) توجه: آب مقطر موجود برای دستگاه به میزان لازم باشد به ازاء پر کردن ظرف مخصوص (حدود 4 لیتر) 500 لیاندا آنتی باکتریال موجود در یخچال اضافه شود . -قرار دادن سینی های محلول در جایگاه مربوطه. -روشن کردن کلید پشت دستگاه . -پس از چند دقیقه کلید جلوی دستگاه را روشن کنید. -پس از لود شدن کامل برنامه wash with water را از آیکون شماه 9 اجرا نمایید. -پس از 15 دقیقه از روشن شدن دستگاه zeroing on water را اجرا نمایید از آیکون 9. حتما با تعویض خانه شماره small24 باتل هیپو کلراید سدیم (کلین) رادر خانه small24 قرار داده وگزینه Extera wash را انتخاب نمایید .این شستشو هفتگی میباشد. -در زیر بازوی راست دستگاه محفظه ای وجود دارد که هر شنبه از پر بودن این محفظه از سرم فیزیولوژی مطمئن شوید در صورت نیاز آنرا پر کنید. -دادن کنترلهای مورد استفاده به دستگاه وچک کردن جوابها(در صورت نیاز تغییر فاکتوریا کالیبر تست و دادن کنترل مجدد) ترولب آماده در فریزر رادر خانه شماره 21 قرمز قرار دهید و سپس از آیکون شماره 8 run control مورد نظر برای کنترل را میزنید. پس از خوانده شدن جوابها از روی آیکون 11 کنترل میشود در صورتی که جوابها نرمال نباشد از آیکون شماره 7 سرم کنترل کالیبراتور داده میشود برای اینکار نمونه کالیبراتور را در یکی از خانه های 1 تا 20 قرار داده (معمولا خانه شماره 1 است) و تستهای مورد نظر را انتخاب کرده و ران میکنیم.		

مهر و امضای واحد تجهیزات پزشکی