

تاریخ: 93/7/26	 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان بیمارستان ایثار ایجرود
بخش: آزمایشگاه	دستورالعمل استفاده از دستگاه BT1500

توجه توجه: حتما پس از ملاحظه جوابهای سرم کنترل و کالیبراتور از آیکون 11 جوابهای این موارد را پرینت نمایید.

- از آیکون شماره 5 بیماران را پذیرش نمایید توجه نمایید که حتمه کد بیمار را وارد نمایید.

- قرار دادن نمونه ها در جایگاه پذیرش شده و RAN کردن.

- ثبت جوابها

توجه توجه: حتما در پایان کار روزانه در آیکون شماره 11 گزینه آرشیو را انتخاب نمایید تا بیماران به آرشیو منتقل شوند و نمونه کنترل در قسمت کنترل کیفی ذخیره شود.

- پس از اتمام کار روزانه Shut down و شستشوی مربوطه را پس از اطمینان از وجود محلول Basic در خانه شماره 24 اجرا نمایید.

- پس از خاموشی کامل درب محلولها را بسته و سینی ها را در یخچال قرار دهید.

کلید پشت دستگاه را خاموش نموده و سطح بیرونی دستگاه و قسمت یخچال را با دستمال مرطوب تمیز نمایید.

نکته مهم: نمونه های لخته بیماران پیش از آزمایش در 37 درجه قرار داده شود و سپس سانتریفیوژ شود تا سرم جدا شده حاوی فیبرین نباشد. فیبرین باعث گرفتگی سوزن دستگاه میشود.