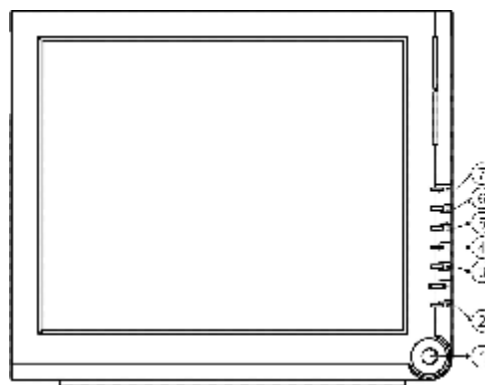


تاریخ: 93/7/26 بخش: اتاق عمل	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان بیمارستان ایثار ایجرود	
	دستورالعمل استفاده از دستگاه مانیتور مدل البرز B5	
شماره سریال: 9204118 شرکت فروشنده: پویندگان راه سعادت	مدل دستگاه: ALBOR B5 شماره شناسایی: 910143	مارک دستگاه: SAADAT
  Power -1 برای روشن و خاموش کردن سیستم مورد استفاده قرار میگیرد. Freeze-2 در حالت نرمال که مانیتور در حال کار است، با فشار دادن این کلید تمام شکل موجهای صفحه نمایش در حالت ثابت باقی می ماند و با فشار دادن مجدد آن دوباره ترسیم سیگنالها ادامه مییابد. REC/STOP-3 با فشردن این کلید میتوان از سیگنال ECG و کلیه پارامترهای عددی به وسیله سانترال و یا رکوردر متصل به دستگاه رکورد گرفت و با فشردن مجدد این کلید رکوردگیری متوقف خواهد شد. HOME/MENU-4		

با فشردن این کلید پنجره HOME WINDOW نمایش داده میشود.

5- START/STOP :

با فشردن این کلید اندازه گیری فشار خون شروع میشود اگر در طول اندازه گیری فشار، این کلید دوباره فشرده شود، اندازه گیری متوقف میشود.

6- Alarm Silence :

با فشردن این کلید میتوان به مدت ۱۲۰ ثانیه آلارم را غیر فعال کرد و شمارشگر معکوس و علامت Silence در Header Area به صورت چشمکزن هر ۵ ثانیه یکبار به نمایش در میآیند. با فشار دادن مجدد این کلید سیستم از حالت سکوت موقت خارج و اجازه فعال شدن دوباره آلارمها داده میشود.

نکته : در صورتی که در شرایط Silence، آلارم جدیدی به وجود آید این حالت غیر فعال میشود.

7- کلید روتاری (Rotary Knob):

با این کلید روتاری میتوان پارامترهای مختلف را انتخاب و تنظیمات پارامترها را اعمال کرد. این کار با چرخاندن کلید روتاری در جهت ساعتگرد و یا پادساعتگرد و فشار دادن آن به داخل انجام میشود. صفحه مربعی که با چرخاندن کلید روتاری بر روی پارامترها حرکت میکند، به مانند یک مکان نما عمل میکند.

وقتی که هیچ پنجره ای بر روی صفحه نمایش دیده نمیشود با چرخاندن ساعتگرد کلید چرخان مکان نما به ترتیب از روی ECG, NIBP, SPO2, IBP, CSM, (برای ۱۲ اینچ به بالا) TEMP, RESP/CO2/Multi-gas عبور میکند. وقتی که مکانما در ناحیه مربوط به هر کدام از پارامترها قرار داشته باشد، تنظیمات مربوط به آن پارامتر قابل انجام است. این کار به صورت زیر انجام میشود:

۱. با فشردن کلید روتاری پنجره مربوط به آن پارامتر باز میشود.

۲. با چرخاندن کلید روتاری میتوان مکان نما را بر روی هر کدام از تنظیمات حرکت داد.

۳. با فشردن کلید روتاری بر روی پارامتر امکان تغییر مقدار آن پارامتر فراهم میشود. این کار با چرخاندن کلید انجامپذیر است و سپس با فشردن دوباره کلید می توان تغییرات انجام گرفته را تثبیت کرد.