

تاریخ: 93/7/26	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان بیمارستان ایثار ایجرود	
بخش: بلوک زایمان	دستورالعمل نحوه استفاده از دستگاه سونی کید	
PMدستگاه: از استریل کردن در دما و فشار بالا و استفاده از اشعه جهت استریل خودداری نمایید. • از وارد شدن آب بداخل دستگاه هنگام تمیزکاری جلوگیری شود. • ژلهای اضافی موجود در سطح پروب را با پارچه نرم پاک کنید. می توانید از الکل 70% جهت تمیز کردن پروب استفاده کنید.	مارک دستگاه: Fonon teb مدل دستگاه: FT-D500 شماره سریال: 502772 شماره شناسایی: 910064 شرک فروشنده: فنون طب	
1- کلیدهای خاموش و روشن : در صورتیکه کلید اصلی تغذیه دستگاه روشن باشد با فشار دادن کلید ONدستگاه روشن و با فشار دادن کلید OOFدستگاه خاموش می شود.		
2- کلید های تنظیم صدا: کلیدUPبرای زیاد نمودن صدا و کلید DOWNرای کم کردن آن بکار می رود.		
3- نمایشگر حجم صدا: نشان دهنده حجم صدای تنظیم شده است. در صورتیکه تمام چراغها روشن باشند صدا در بیشترین مقدار و در صورتیکه فقط یک چراغ روشن باشد کمترین مقدار صدا انتخاب شده است. تنظیم حجم صدا به کمک کلیدهای تنظیم صدا (2) انجام می گیرد و در مدل D500در این قسمت تعداد ضربان قلب بر روی LCD نمایش داده میشود.		
4- سوکت پروب: محل اتصال فیش پروب به دستگاه است.		
5- محل اتصال گوشی: برای اتصال گوشی یا ضبط صوت بکار می رود.		
6- کلید فیلتر: برای گرفتن نویز اضافی دستگاه .		
7- جا پروبی: محل قرار گرفتن پروب دستگاه.		
8- نشانگر اتصال به برق شهر: در صورت اتصال دستگاه به برق شهر این چراغ روشن میشود.		
9- نشانگر روشن و خاموش: با فشار دادن کلید روشن و خاموش (1) این نمایش گر وضعیت روشن و خاموش بودن دستگاه را نمایش میدهد		
10- نشانگر وضعیت باتری: سبز بودن این نشانگر به معنی شارژ کامل و قرمز بودن آن کم بودن شارژ باتری را نمایش میدهد.		

مهر و امضای واحد تجهیزات پزشکی