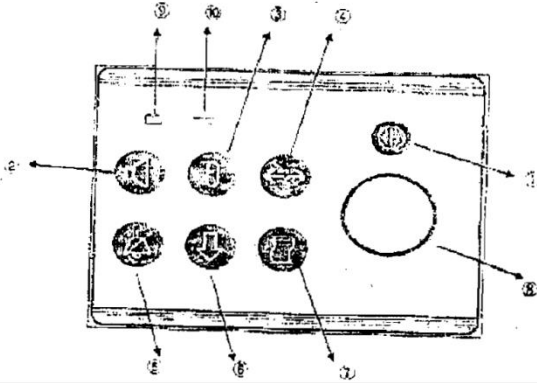


تاریخ: 93/7/26 بخش: بلوک زایمان	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان بیمارستان ایثار ايجرود دستورالعمل استفاده از دستگاه فتال مانیتورینگ	
کلیدهای دستگاه با چرخش ولوم روی دستگاه می‌توانید موارد زیر را انتخاب کرده و یا فشار دادن کلید به سمت داخل، وارد منوی مربوطه شده و آنرا تنظیم نمایید.  1- کلید روشن و خاموش کردن دستگاه 2- کلید تنظیم صدای بلندگو 3- کلید تنظیم صفر UA 4- پس از وصل پراب TOCO و بعد از آماده شدن بیمار برای علامت گذاری شروع تست این کلید را فشار دهید. 5- کلید حافظه داخلی دستگاه - توسط این کلید می‌توانید اطلاعات ذخیره شده توسط دستگاه را مشاهده نمایید. 6- کلید قطع و وصل آلارم 7- کلید علامت گذار پرستار 8- کلید شروع و پایان چاپ اطلاعات نحوه کار با دستگاه دستگاه را روشن کرده و پرابهای TOCO و US1 را به آن وصل نمایید. در صورت دوقلو بودن جنین، پراب US2 را نیز به دستگاه متصل نمایید. به منظور تست FHR پراب US را به زل مخموم افشته کرده سپس آن را مطابق شکل زیر به بیمار وصل کنید. ضربان قلب جنین را پیدا کنید. در این حالت باید صدای قلب جنین به وضوح شنیده شود و روی صفحه نمایش دستگاه، در قسمت FHR شکل قلب به صورت چشمک زن در می آید و تعداد ضربان قلب جنین به صورت عددی مشاهده خواهد شد. در این حالت پراب را بر روی کمر بند محکم کنید تا حرکت نکند و از شکم بیمار جدا نشود. مراحل فوق را برای تست TOCO تکرار کنید. پس از آماده شدن بیمار کلید 0 را به منظور علامت شروع تست فشار دهید. 