

تاریخ: 93/7/26	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان بیمارستان ایثار ايجرود	
بخش: اتاق عمل	دستورالعمل نحوه استفاده از دستگاه پالس اکسیمتر	
PM دستگاه: برای نظافت دستگاه از اسپری های تمیز کننده استفاده ننموده و فقط از دستمال نم دار یا پنبه الکلی استفاده فرمایید.	مارک دستگاه: ABADIS مدل دستگاه: 707 شماره سریال: 707120161056 شماره شناسایی: 910161 نام شرکت فروشنده: پارسیان طب پژوهش	
برای روشن کردن دستگاه کلید POWER 2 ثانیه نگه داشته شود. برای خاموش کردن دستگاه کلید POWER 4 ثانیه نگه داشته شود. از کلید آلارم جهت قطع موقت هشدارهای صوتی استفاده کنید. برای انتخاب منوها و تغییر مقادیر تنظیمات از کلیدهای منوی  SETUP استفاده کنید. برای جابجایی در منو و کاهش مقادیر تنظیمات از کلیدهای منوی  و  SETUP استفاده کنید. کلید LIMITS برای تنظیم حد بالا و پایین هشدارهای دستگاه مربوط به دو فاکتور PULSE و SPO2 می باشد. با فشار دادن کلید TREND می توانید وارد منوی مربوط به ثبت اطلاعات بیمار در بازه زمانی تنظیم شده گردید. کلید VIEW برای تغییر در کنتراست صفحه نمایش و شدت نور پیش زمینه استفاده می شود. از کلید SETUP جهت ورود به منوی تنظیمات استفاده کنید. برای استفاده از دستگاه به صورت عمودی کلید ROTATE را فشار دهید. برای قطع جریان برق از دستگاه می توانید از کلید خاموش — روشن که در پشت دستگاه عبیه شده است استفاده نمایید.		

مهر و امضای واحد تجهیزات پزشکی